

БРУВІСКРІН

Bruviscreen

Захист від ультрафіолету (УФ-захист)

Стерильний розчин полівінілового спирту та гіалуронату натрію

Очні краплі БРУВІСКРІН - це медичний виріб для офтальмологічного використання.

Інструкція із застосування

Загальна характеристика. Очні краплі БРУВІСКРІН - це стерильний водний гідрогель, який використовується для змащування, зволоження і захисту тканин ока від ультрафіо-летового випромінювання. Первинна композиція гідрогелю базується на гліцерині, що притягує воду з тканин ока й утворює на поверхні рогівки водну плівку, яка, за наявності полівінілового спирту та гіалуронату натрію, вбудовується в сітку цих полімерних речо-вин. Таким чином формується дуже стабільна колоїдна гідрогелева плівка (форма) з в'язко-еластичними властивостями, яка здатна поглинати речовини наявні в колоїдній композиції, забезпечуючи тривалий контакт із рогівкою і кон'юнктивою.

Очні краплі БРУВІСКРІН містять N-метил-бензохіноліну-метилсульфат - речовину, широковідому протягом десятиліть, з дуже хорошою переносимістю, чудовим "фізич-ним» екрануючим впливом щодо ультрафіолетових променів, оскільки поглинає ультра-фіолетове випромінювання з довжиною хвилі від 280 до 315 нм, яке найбільш небезпеч-не для тканин ока. Названа речовина, що входить до складу гідрогелю, який є основою цього препарату, рівномірно розподіляється у вигляді тонкої в'язко-еластичної, слизопо- дібної і дуже стабільної плівки, яка тривало захищає тканини ока від шкідливої дії уль-трафіолетових променів природного (сонце, на снігу чи на морі) або штучного (галогенні лампи, монітори, телевізори, солярії або бактерицидні лампи для санітарного викорис-тання, тощо) походження, усуваючи подразнення очей після стресу.

Основні хіміко-фізичні властивості очних крапель БРУВІСКРІН: повністю прозорий і майже безбарвний розчин; має значення рН, в'язкості та осмолярності повністю сумісних із тканинами ока та слюзною рідиною, що забезпечує його високу переносимість.

Склад: ІМ-метил-бензохіноліну-метилсульфат 0,3%, спирт полівініловий 1,25%, натрію гіалуронат 0,01%, гліцерин 0,68%, метилпарагідроксибензоат 0,03%, пропілпарагідрокси- бензоат 0,012%, динатрію едетат, натрію хлорид, натрію фосфат двоосновний, калію фосфат одноосновний, гідролат гамамелісу, очищена вода.

Спосіб застосування. Закапувати 1-2 краплі у нижнє кон'юнктивальне склепіння ока, обережно натискаючи на флакон, 3-5 і більше разів на день під час дії ультрафіолетових променів.

Особливі застереження:

- Можуть використовувати люди, які носять жорсткі та м'які контактні лінзи, оскільки, продукт не містить четвертинних солей амонію.
- Не торкатися ока, ділянки повік навколо очей та інших поверхонь кінчиком флакона.
- Не використовувати в разі інфекції очей.
- Не застосовувати одночасно разом з іншими очними краплями; між введенням препара-тів має бути інтервал приблизно у 15 хвилин.
- Не використовувати в разі відомої непереносимості будь-якого компонента крапель.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Утилізувати препарат через 30 днів після першого відкриття флакону.

Умови зберігання. Зберігати за температури не вище +25°C.

Попередження. Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Упаковка. Флакон 10 ml (мл).

Примітка: формула очних крапель БРУВІСКРІН захищена міжнародним патентом.

БРУСКЕТТИНІ С.р.л. Via Ізонцо, 6-16147 Генуя, Італія BRUSCHETTINI S.r.l. Via Isonzo, 6-16147 Genova, Italy

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «ВІЗУЄ ФАРМ»

01013, вул. Будіндустрії буд. 5-Б - м. Київ, Україна

Тел. +38 (044) 281 24 06