

Грілка резинова комбінована Б-1

Гумова грілка типу Б проста в експлуатації, тому застосовується як в домашніх умовах, так і в медичних установах, в лікарнях, наприклад.

Оскільки тип Б виготовлявся як комбінований, він служить не тільки для обігріву або охолодження тіла, але і для промивання кишечника або різних зрошувальних гінекологічних процедур

(спринцювання).

Завдяки наявності додаткових насадок, грілка виконує свою роботу просто чудово!

Грілка повністю герметична (в закритому стані, зрозуміло) і безпечна у використанні для здоров'я людини, як і для всіх живих істот, включаючи домашніх тварин.

Вона стійка до багаторазової дезінфекції, що особливо важливо, до розчинів оцтової кислоти з вмістом марганцевокислого калію.

Правила використання

Промити грілку гарячою водою при температурі не вище 90 ° С, зовні протерти 2 рази марлевым тампоном, змоченим в 1% -ному за масою розчині хлораміну або 3% -ному за масою розчині

перекису водню з додаванням 0,5% -ного за масою розчині миючого засобу, потім промити проточною водою. При застосуванні грілки для місцевого зігрівання тіла під втулку вкрутити

пробку;

При застосуванні грілки для промивання та спринцювання, пробку замінити гвинтовим затвором з наскрізним отвором, на вільний кінець якого надіти гумову

трубку і пропустити її через

широку частину Т образного отвору затиску. В інший кінець трубки вставити на конечник (при промиванні) або матковий наконечник (при спринцюванні);

Перед кожним застосуванням для промивання та спринцювання грілку разом з приєднаною для цих цілей системою за пунктом (б) продезінфікувати одним з вищевказаних розчинів за

пунктом (а), приєднати простерелізований наконечник; г) режим дезінфекції, передстерилізаційного очищення і стерилізації, які застосовуються хімікати, послідовність обробки по ОСТ 42-

21-2;

При індивідуальному користуванні можлива дезінфекція грілки з системою розчинами за пунктом (а) не перед кожним застосуванням. При цьому грілку з системою промити гарячою водою

температурою не вище 90 ° С, приєднати наконечник, оброблений 1% -им за масою розчином хлораміну протягом 30 хв. або 3% -им за масою розчином перекису водню протягом 80 хв. й

промити гарячою проточною водою; е) після кожного застосування наконечник грілки використаної в лікувальному закладі, занурити в один з дезінфікуючих розчинів за пунктом (а) по ОСТ

42-21-2. Після кожного застосування наконечник для індивідуального використання промити проточною водою з милом, обполоснути;

Після застосування грілки для місцевого зігрівання тіла звільнити від води і підвісити за петлю. Грілку для промивання та спринцювання разом з системою для цих цілей промити гарячою

проточною водою і підвісити за петлю. При цьому затиск перевести в положення дозволяє випустити з грілки всю воду.

Умови зберігання

Грілку слід зберігати в підвішеному за петлю стані у приміщенні при температурі від 0 до 25 ° С на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів.

Грілка не повинна піддаватися впливу прямих сонячних променів, масел, бензину та інших розчинників.

Виробник гарантує якість грілки при дотриманні умов збереження й експлуатації.