

Інгалятор побутовий "Махольда"

Інгалятор побутовий ДІАС призначений для профілактики і лікування в домашніх умовах широкого спектру захворювань шляхом інгаляцій ефірними маслами, спиртовими настоянками лікарськими рослинами.

Показання до застосування

- профілактика і комплексна терапія запальних захворювань дихальних шляхів, ЛОР-органів, а також професійних захворювань у співаків, вчителів, шахтарів, хіміків, зварювальників та ін .;
- порушення діяльності серцево-судинної і нервової систем;
- зниження захисних функцій організму.

Рекомендації щодо застосування

Перед використанням промийте інгалятор теплою проточною водою і влийте в воронкоподібний кінець трубки необхідну кількість ефірного масла: дорослим - 2-4 краплі ефірного масла, тривалість інгаляції 4-5 хв; особам похилого віку та дітям до 10 років - 1-2 краплі, тривалість інгаляції 1-2 хв.

Інгаляції проводити з інтервалом 2-4 години, в разі необхідності - через 1-2 години. Можна проводити інгаляції ротом і носом.

Після інгаляції рекомендується відпочити, не їсти і не пити протягом 40-60 хв.

Інгаляції необхідно продовжувати до зникнення ознак захворювання. Тривалість курсу не повинна перевищувати 30 днів. Перерва між курсами 10-14 днів. У профілактичних цілях можна робити інгаляцію один раз в день.

Особливі вказівки

Якщо в інгаляторі, яким користується одна особа залишилося ефірне масло, отвір апарату можна закрити пробочками щоб уникнути випаровування масла до наступної процедури. Перед використанням інгалятора іншою особою, або при необхідності заміни ефірного масла, інгалятор промити 96% спиртовим розчином і теплою проточною водою.