

Маска киснева для дорослих Medicare без мішка

Призначення:

Для подачі кисню з фіксованою концентрацією на вході кисневої лінії. Можна також застосовувати для проведення інгаляційного лікування.

Для дорослих / для дітей.

Технічні характеристики:

1. Складається з маски з фіксатором і трубки з коннектором (педіатрична - маска для дітей);
2. Маска виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду;
3. Отвори на бічних поверхнях маски (клапани видиху) забезпечують вентиляцію;
4. Легко фіксується за допомогою гнучкої алюмінієвої носової пластини і еластичною кольорової стрічки;
5. Краї маски закругленою форми;
6. Прозорість матеріалу дозволяє контролювати стан пацієнта;
7. Забезпечує подачу кисню з концентрацією на вдиху 60% при потоці 6-10 л/хв;
8. Можливість приєднання кисневого концентратора, небулайзера, зволожувача;
9. Нестерильна;
10. Для одноразового використання;
11. Термін придатності 5 років від дати виготовлення, зазначеної на упаковці;
12. Індивідуальна упаковка.

Розміри:

- Доросла, педіатрична;
- Довжина трубки для підключення до кисневої магістралі - 2,1 м.

Інструкція по використанню:

1. Підключіть трубку до джерела кисню і встановіть необхідний потік;
2. Переконайтеся, що кисень проходить через маску;
3. Одягніть маску на пацієнта так, щоб еластичний ремінець проходив над вухами;
4. Підтягніть ремінець для надійної фіксації маски;
5. Притисніть металевий затиск до носа пацієнта;
6. Після використання утилізувати згідно з установленими нормами.